


# Guida di riferimento rapido

## App Masimo SafetyNet™

AVVERTENZA: evitare l'auto-diagnosi o l'auto-medicazione sulla base di queste misurazioni. Consultare sempre il medico.

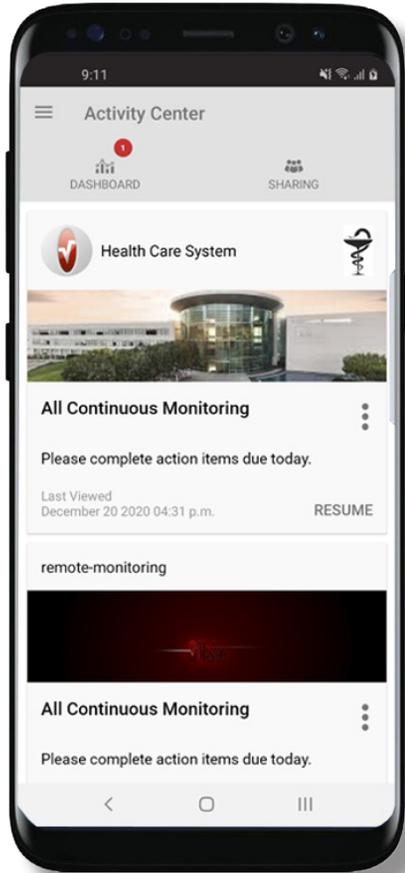

> Scaricare e installare l'app Masimo SafetyNet da:

Google Play



App Store



> Avviare l'app e seguire le istruzioni dettagliate per creare un account, partecipare a un CareProgram™ condiviso e iniziare a raccogliere e condividere dati.

Per assistenza o altre domande, visitare:  
[www.masimo.com/masimo-safetynet](http://www.masimo.com/masimo-safetynet)



301368/LAB-10722B-0621  
EN-LAB-10206C

[www.masimo.com](http://www.masimo.com)


## Accesso, registrazione, posizione, notifiche

### > Registrazione

- Registrare un account con il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono.
- Gli utenti che hanno ricevuto un CareProgram da un operatore sanitario devono effettuare la registrazione con l'indirizzo e-mail o il numero di telefono utilizzato per l'invio dell'invito.

> Verificare che la posizione e le notifiche siano consentite per un corretto funzionamento dell'app.

### Posizione

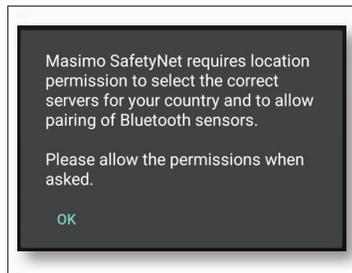

CONSENTIRE

### Masimo SafetyNet



This app allows you to securely share your health data with anyone.


You can also receive care instructions from your doctor through this app.

Log In Using Masimo SafetyNet ID


Sign Up

Log In

### Notifiche

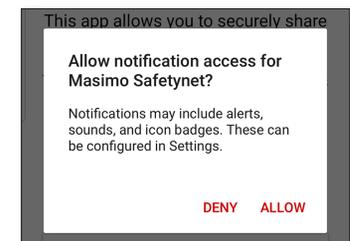


## Autorizzazioni per i dati sulla salute (solo iOS)

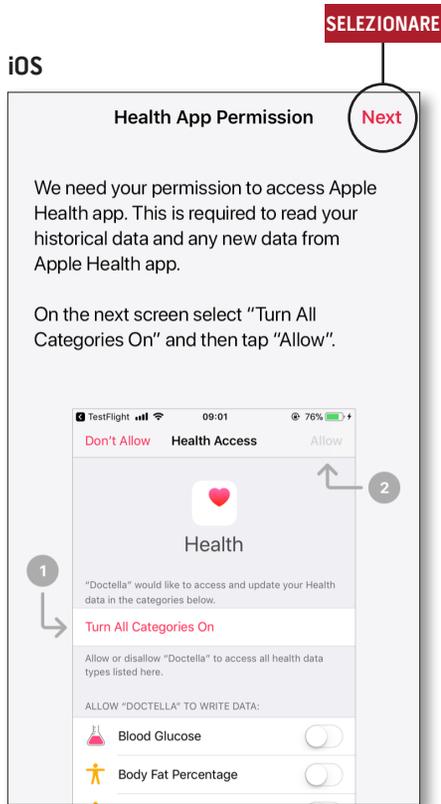

- > **Seguire le istruzioni visualizzate:** per consentire a Masimo SafetyNet di accedere ai dati sulla salute e raccogliarli dal dispositivo.


## Centro attività

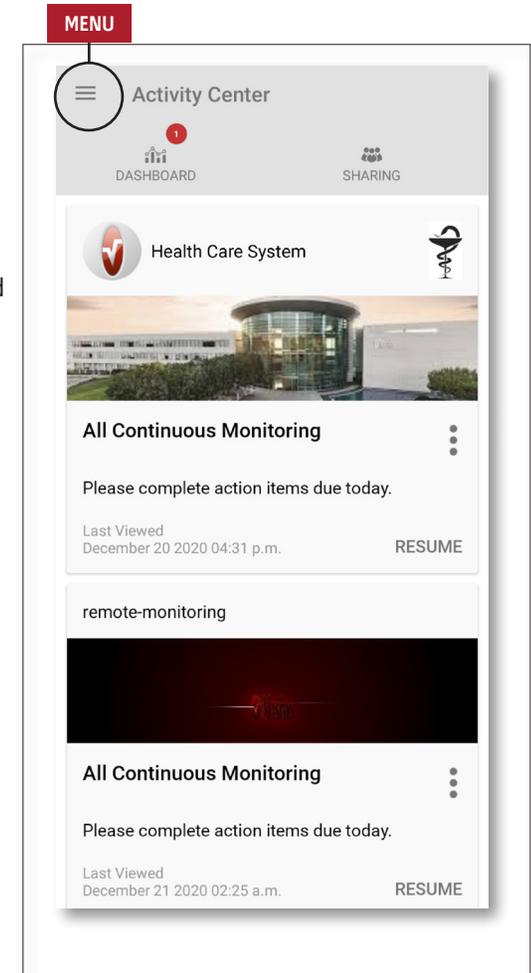

- > **Menu**
  - Visualizza il menu dell'app.
- > **Dashboard (Dashboard)**
  - Visualizza la schermata Dashboard (Dashboard) che contiene i dati sulla salute dell'utente.
  - Visualizza i dati sulla salute condivisi da altri utenti.
- > **Sharing (Condivisione)**
  - Visualizza gli operatori sanitari, il personale dell'assistenza e i componenti della famiglia con cui l'utente sta attualmente condividendo i dati.
  - Condivide i dati con un altro operatore sanitario, altro personale dell'assistenza o un altro componente della famiglia.
- > **CareProgram**
  - Consente all'utente di visualizzare o eliminare un CareProgram.

## Menu

- Il menu può essere visualizzato anche facendo scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra.

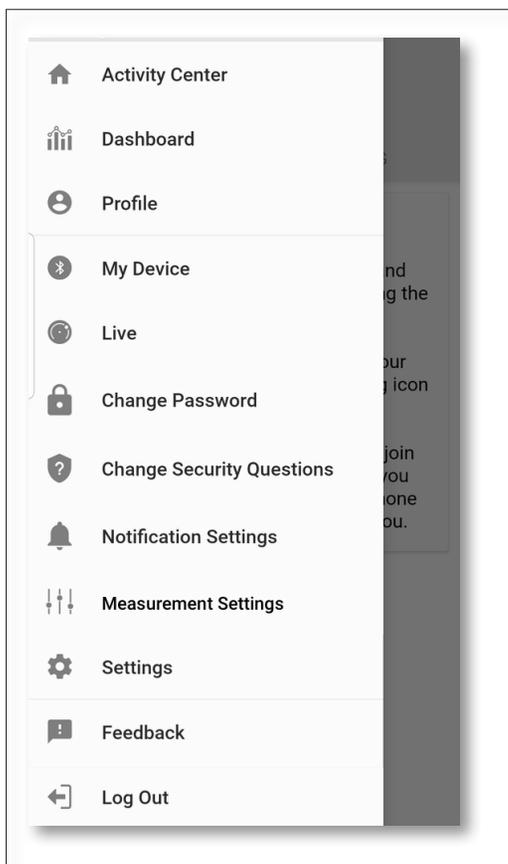

### > Activity Center (Centro attività)

- Visualizza la schermata Activity Center (Centro attività).

### > Dashboard (Dashboard)

- Visualizza la schermata Dashboard (Dashboard).

### > Profile (Profilo)

- Visualizza le informazioni del profilo utente.
- Consente all'utente di modificare le informazioni del profilo.

### > My Device (Dispositivo personale)

- Consente all'utente di aggiungere un dispositivo per il monitoraggio.

### > Live (In tempo reale)

- Consente all'utente di visualizzare i dati del dispositivo di monitoraggio connesso.

### > Change Password (Modifica password)/Change Security Questions (Modifica domande di sicurezza)

- Consentono all'utente di modificare la password e/o le domande di sicurezza in caso di perdita della password.

### > Notification Settings (Impostazioni di notifica)

- Consente all'utente di modificare le impostazioni dell'app relative ai promemoria e alle notifiche.

### > Measurement Settings (Impostazioni di misurazione)

- Consente all'utente di modificare le unità di misura.

### > Settings (Impostazioni)

- Visualizza l'ID utente.
- Consente all'utente di abilitare o disabilitare Touch ID o Face ID per accedere all'app.
- Visualizza informazioni sull'app.


### > Feedback (Feedback)

- Consente all'utente di inviare un'e-mail al supporto di Masimo SafetyNet.

### > Log Out (Disconnessione)

- Consente all'utente di disconnettersi dall'app.

## Dashboard

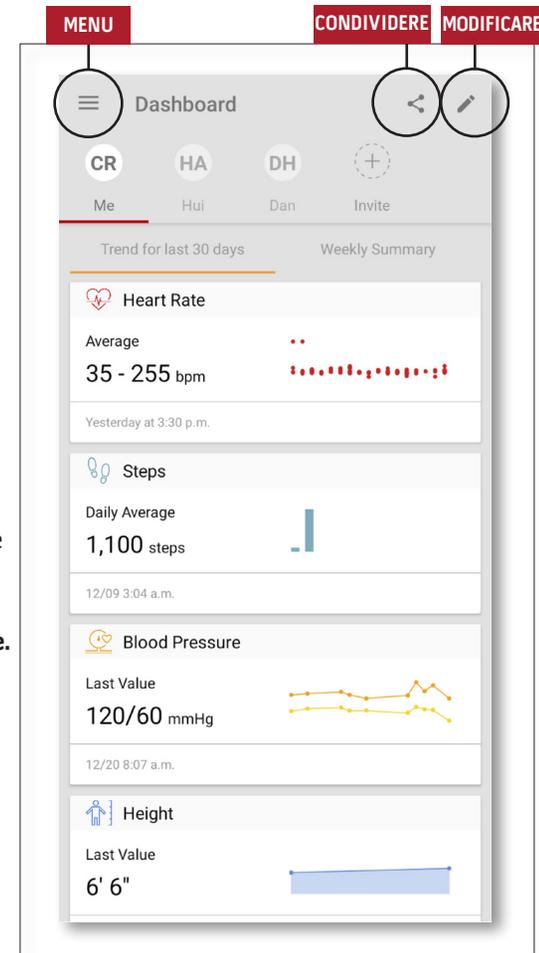

### > Invite (Invita)

- Consente di invitare altri utenti alla condivisione di informazioni tramite l'app.

### > Share (Condividi)

- Visualizza gli operatori sanitari, il personale dell'assistenza e i componenti della famiglia con cui l'utente sta attualmente condividendo i dati.


### > Edit (Modifica)

- Consente all'utente di riorganizzare i dati nella Dashboard.

### > Visualizza i dati degli ultimi 30 giorni o un riepilogo settimanale.

- La selezione della scheda di un parametro consente di visualizzare le tendenze, gli intervalli di date e molte altre informazioni.

## CareProgram

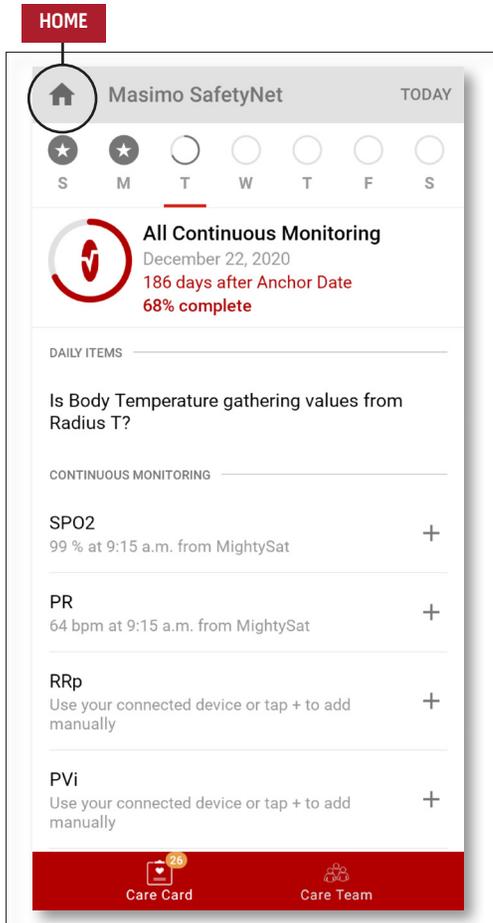

### > Care Card (Scheda sanitaria)

- Visualizza i dati della Care Card (Scheda sanitaria).

### > Home

- Torna all'Activity Center (Centro attività).


### > Learn (Scopri)

- Presente nella parte inferiore del CareProgram, visualizza altre informazioni fornite dal personale dell'assistenza.

### > Care Team (Team sanitario)

- Visualizza l'elenco degli operatori sanitari, del personale dell'assistenza e dei componenti della famiglia con cui vengono condivisi i dati.

## Condivisione

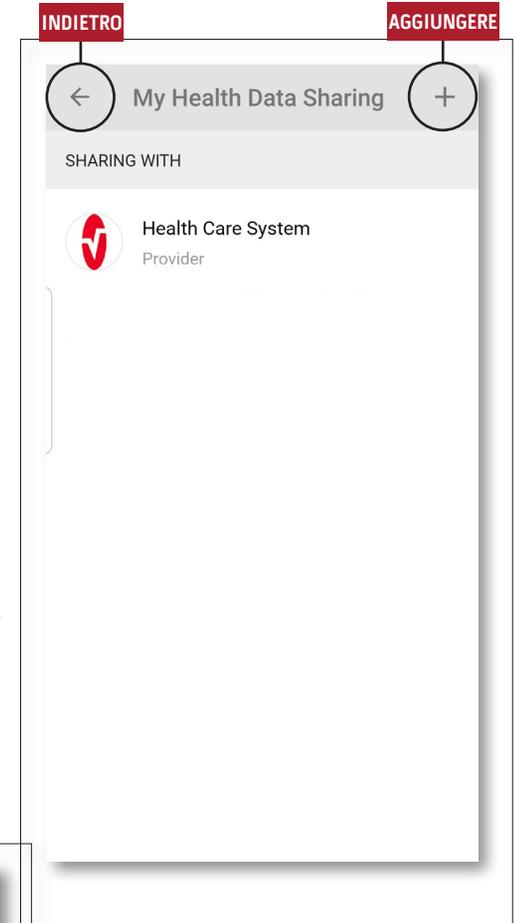

### > Visualizza l'elenco degli operatori sanitari, del personale dell'assistenza e dei componenti della famiglia con cui vengono condivisi i dati.

### > Aggiungere

- Condividere i dati con altri operatori sanitari.
- Condividere i dati con altro personale dell'assistenza o altri componenti della famiglia.

### > Far scorrere la riga della persona con cui si condividono i dati per rimuoverla o modificarne i privilegi.

### AGGIUNGERE

