# Kurzanleitung

Masimo SafetyNet<sup>™</sup> App

WARNUNG: Es darf keine Eigendiagnose oder Eigenbehandlung auf der Basis der Messungen erfolgen. Es muss immer ein Arzt konsultiert werden.



> Hier können Sie die Masimo SafetyNet App herunterladen und installieren:

#### **Google Play**



#### App Store



> Starten Sie die App und folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um ein Konto zu erstellen, an einem gemeinsamen CareProgram<sup>™</sup> teilzunehmen und Ihre ersten Daten zu erfassen und zu teilen.

### Sollten Sie Unterstützung benötigen oder Fragen haben, besuchen Sie www.masimo.com/masimo-safetynet

©2021 Masimo Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



301369/LAB-10723B-0621 EN-LAB-10206C

#### www.masimo.com

## Anmeldung, Registrierung, Standort, Benachrichtigungen





#### www.masimo.com

Position

asked.

servers for your country and to allow

Please allow the permissions when

ERLAUBEN

pairing of Bluetooth sensors.

## Gesundheitsberechtigungen (nur iOS)

### Aktivitätszentrum



> Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm: Gestatten Sie Masimo SafetyNet, auf Gesundheitsdaten auf diesem Gerät zuzugreifen und diese zu sammeln.

- > Menu (Menü)
  - Öffnen Sie das App-Menü.

#### > Dashboard (Dashboard)

- Öffnen Sie den Bildschirm "Dashboard" (Dashboard), auf dem die Gesundheitsdaten des Benutzers angezeigt werden.
- Sehen Sie die von anderen Benutzern geteilten Gesundheitsdaten ein.
- > Sharing (Teilen)
- Zeigt die Gesundheitsdienstleister, Krankenpflegekräfte und Familienmitglieder an, mit denen der Benutzer derzeit Daten teilt.
- Teilen Sie Daten mit weiteren Gesundheitsdienstleistern, Krankenpflegekräften oder Familienmitgliedern.
- > CareProgram
- Erlaubt dem Benutzer, ein CareProgram anzusehen oder zu löschen.

$\equiv$ Activity Center	
	*** ((3))
DASHBOARD SH	HARING
Health Care System	S
	Tax.
All Continuous Monitoring	• •
Please complete action items due to	oday.
Last Viewed December 20 2020 04:31 p.m.	RESUME
remote-monitoring	
<b>S</b> HE RE	
All Continuous Monitoring	* *
Please complete action items due to	oday.
Last Viewed	RESUME

### Menü

• Das Menü kann auch aufgerufen werden, indem Sie von links nach rechts über den Bildschirm streichen.

		_
ŧ	Activity Center	I
ÎÎ	Dashboard	2
θ	Profile	
*	My Device	nd ig th
۲	Live	bur
e	Change Password	, icc
?	Change Security Questions	join /ou
¢	Notification Settings	ou.
	Measurement Settings	
۵	Settings	
	Feedback	
÷	Log Out	

#### > Feedback (Feedback)

- Erlaubt dem Benutzer, eine E-Mail an den Support von Masimo SafetyNet zu senden.
- > Log Out (Abmelden)
- Erlaubt dem Benutzer, sich bei der App abzumelden.

#### > Activity Center (Aktivitätszentrum)

- Zeigt den Bildschirm "Activity Center" (Aktivitätszentrum) an.
- > Dashboard (Dashboard)
  - Zeigt den Bildschirm "Dashboard" (Dashboard) an.
- > Profile (Profil)
- Zeigt die Benutzerprofildaten an.
- Erlaubt dem Benutzer die Bearbeitung der Profildaten.
- > My Device (Mein Gerät)
- Erlaubt dem Benutzer, ein zu
- überwachendes Gerät hinzuzufügen.
- > Live (Live)
- Erlaubt dem Benutzer, Daten von dem verbundenen Überwachungsgerät einzusehen.
- > Change Password (Kennwort ändern) /Change Security Questions (Sicherheitsfragen ändern)
- Erlaubt dem Benutzer, bei Verlust des Kennworts das Kennwort und/oder die Sicherheitsfragen zu ändern.

# Notification Settings (Benachrichtigungseinstellungen)

- Erlaubt dem Benutzer, die Einstellungen f
  ür App-Benachrichtigungen und -Erinnerungen zu 
  ändern.
- > Measurement Settings (Messeinstellungen)
- Erlaubt dem Benutzer, die Maßeinheiten zu ändern.
- > Settings (Einstellungen)
- Zeigt die Benutzer-ID an.
- Erlaubt dem Benutzer die Aktivierung oder Deaktivierung von "Touch ID" oder "Face ID" (Identifizierung mittels Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) zur Anmeldung in der App.
- Zeigt App-Informationen an. www.masimo.com

### > Invite (Einladen)

 Erlaubt dem Benutzer, andere einzuladen, um über die App Informationen zu teilen.

Dashboard

- > Sharing (Teilen)
- Zeigt die Gesundheitsdienstleister, Krankenpflegekräfte und Familienmitglieder an, mit denen der Benutzer derzeit Daten teilt.
- > Edit (Bearbeiten)
- Erlaubt dem Benutzer, die Daten auf dem Dashboard (Dashboard) anders anzuordnen.
- > Sehen Sie die Daten der letzten 30 Tage oder eine Wochenzusammenfassung an.
- > Wählen Sie eine Parameterkarte aus, um Trends, Datenbereiche und zusätzliche Daten anzusehen.

ENU		TEILEN	DEAR
Dashboard			Y
CR HA	DH	$(\pm)$	
Me Hui	Dan	Invite	
Trend for last 30 days	1	Weekly Summa	ary
😯 Heart Rate			
Average	••		
35 - 255 <sub>bpm</sub>	****	******	• ± ¥
Yesterday at 3:30 p.m.			
Steps			
Daily Average	1.1		
1,100 steps			
12/09 3:04 a.m.			
😟 Blood Pressure			
Last Value			~
120/60 mmHg			~
12/20 8:07 a.m.			
1 Height			
Last Value			
6' 6"			

### CareProgram

## Teilen



A

PR

PVi