


Guía de referencia rápida

Aplicación Masimo SafetyNet™

ADVERTENCIA: No se autodiagnostique ni automedique de acuerdo a mediciones realizadas. Consulte siempre con su médico.

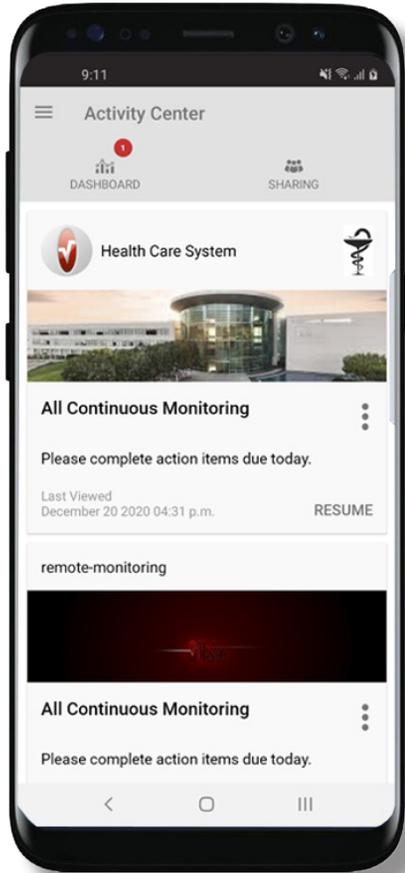

- > Descargue e instale la aplicación Masimo SafetyNet en:

Google Play



La App Store



- > Inicie la aplicación y siga las instrucciones detalladas para crear una cuenta, participar de manera compartida en CareProgram™ y empezar a recopilar y compartir datos.

Para más ayuda o preguntas, visite:
www.masimo.com/masimo-safetynet



301370/LAB-10724B-0621
EN-LAB-10206C


www.masimo.com

Inicio, registro, ubicación y notificaciones


> Sign Up (Registro)

- Regístrese para obtener una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.
- Si ha recibido un CareProgram por parte de un profesional sanitario, debe registrarse con el correo electrónico o el número de teléfono utilizado para enviar su invitación.

- > Asegurarse de tener activadas la ubicación y las notificaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación.

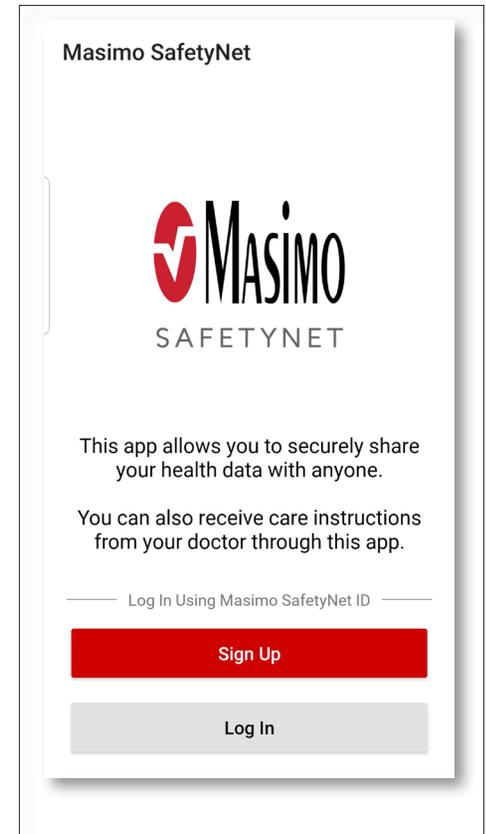


Ubicación

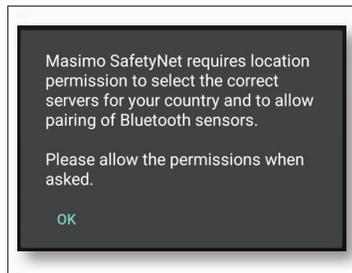


PERMITIR

Notificaciones

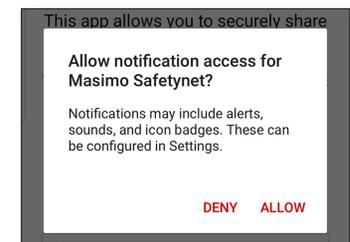


Autorizaciones sanitarias (solo para iOS)

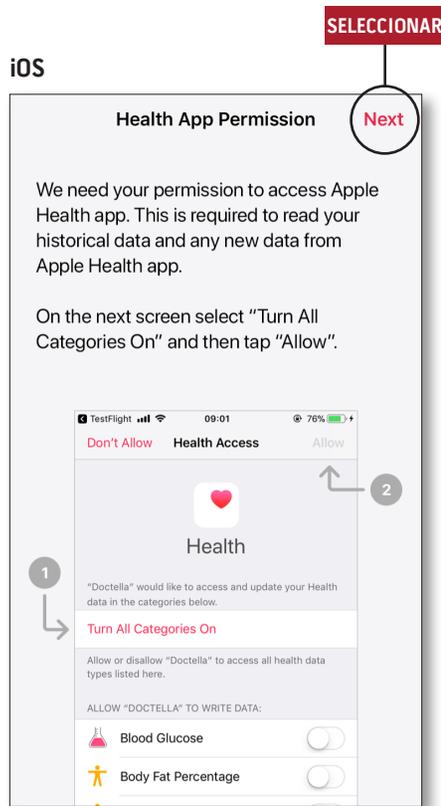

- > **Siga las instrucciones que aparecen en pantalla:** Para que Masimo SafetyNet acceda y recopile los datos de salud del dispositivo.


Centro de actividad

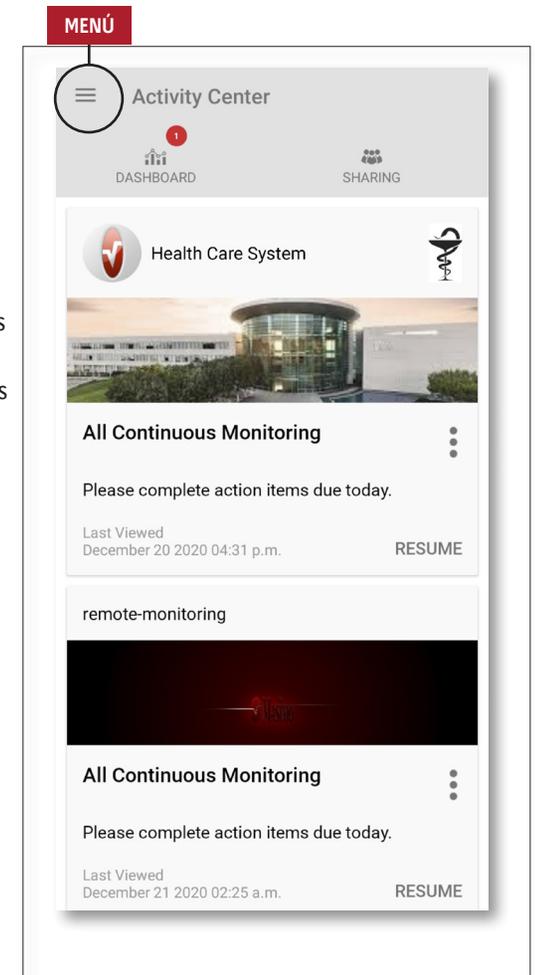

- > **Menu (Menú)**
 - Vea el menú de la aplicación.
- > **Dashboard (Panel de control)**
 - Vea la pantalla del Dashboard (Panel de control), que muestra los datos de salud del usuario.
 - Vea los datos de salud compartidos por otros usuarios.
- > **Sharing (Datos compartidos)**
 - Muestra los profesionales sanitarios, los cuidadores y los familiares con los que el usuario está compartiendo datos.
 - Comparta datos con otro profesional sanitario, cuidador o familiar.
- > **CareProgram**
 - Permite al usuario ver o borrar un CareProgram.

Menú

- También es posible ver el menú deslizando el dedo por la pantalla de izquierda a derecha.

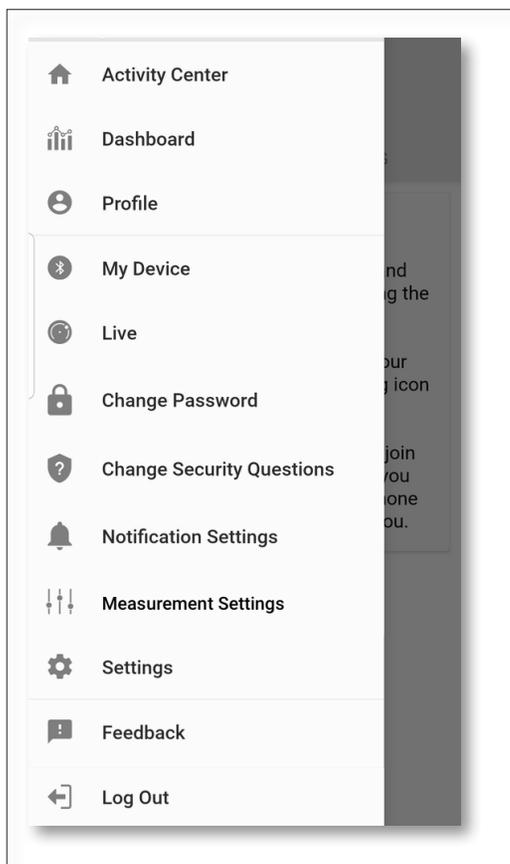


- > **Activity Center (Centro de actividad)**
 - Muestra la pantalla del Activity Center (Centro de actividad).
- > **Dashboard (Panel de control)**
 - Muestra la pantalla del Dashboard (Panel de control).
- > **Profile (Perfiles)**
 - Muestra la información del perfil del usuario.
 - Permite al usuario modificar la información del perfil.
- > **My Device (Mi dispositivo)**
 - Permite al usuario añadir un dispositivo para el control.
- > **Live (En directo)**
 - Permite al usuario ver los datos del dispositivo de control conectado.
- > **Change Password (Cambiar contraseña)/Change Security Questions (Cambiar preguntas de seguridad)**
 - Permite al usuario cambiar la contraseña y/o las preguntas de seguridad en caso de pérdida de la contraseña.
- > **Notification Settings (Ajustes de notificaciones)**
 - Permite al usuario cambiar los ajustes de notificaciones y recordatorios de la aplicación.
- > **Measurement Settings (Ajustes de medición)**
 - Permite al usuario cambiar las unidades de medición.


- > **Settings (Ajustes)**
 - Muestra la información del usuario.
 - Permite al usuario activar o desactivar el Touch ID o el Face ID para iniciar sesión en la aplicación.
 - Muestra la información de la aplicación.
- > **Feedback (Comentarios)**
 - Permite al usuario enviar un correo electrónico al soporte de Masimo SafetyNet.
- > **Log Out (Cerrar sesión)**
 - Permite al usuario cerrar la aplicación.

Panel de control

- > **Invite (Invitar)**
 - Permite al usuario invitar a otros a compartir información a través de la aplicación.
- > **Sharing (Datos compartidos)**
 - Muestra los profesionales sanitarios, los cuidadores y los familiares con los que el usuario está compartiendo datos.
- > **Edit (Editar)**
 - Permite al usuario reorganizar los datos en el panel de control.
- > **Ver datos de los últimos 30 días o un resumen semanal.**
- > **Seleccionar una tarjeta de parámetros para ver tendencias, intervalos de fechas y datos adicionales.**

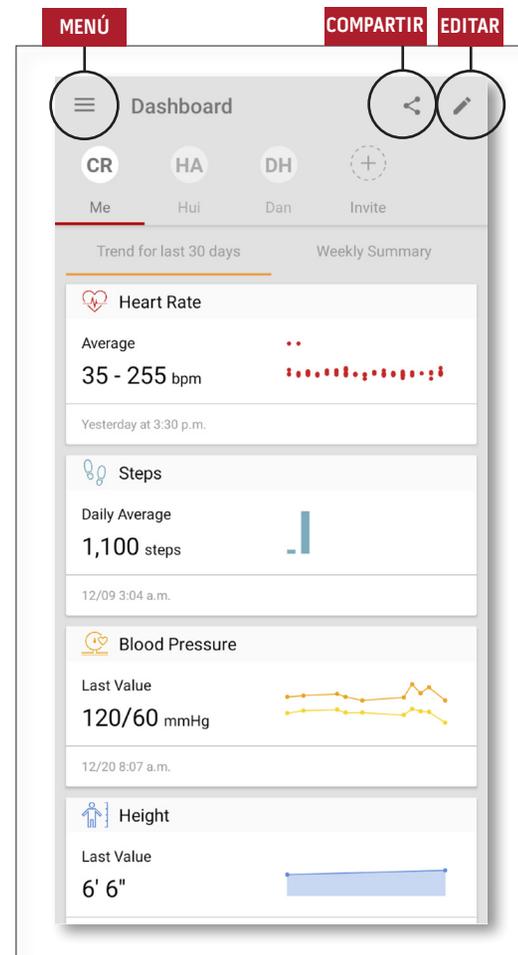

CareProgram

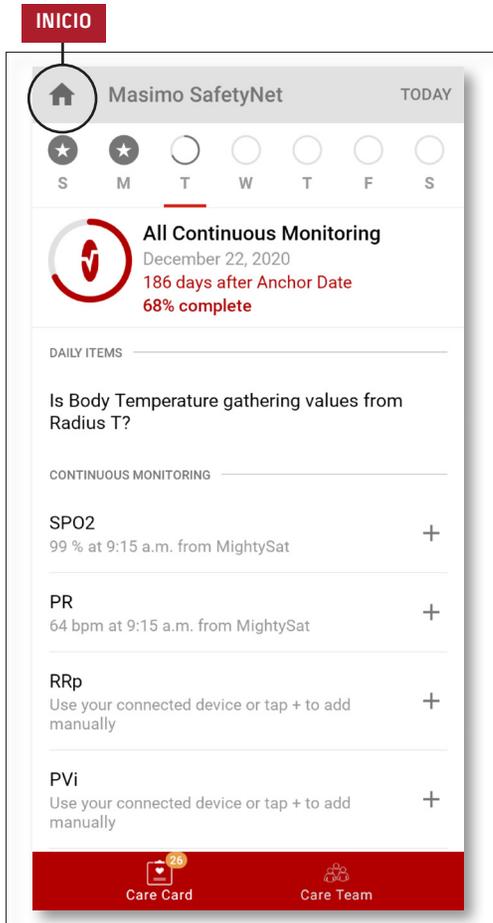

> Care Card (Tarjeta sanitaria)

- Vea los datos de la Care Card (Tarjeta sanitaria).

> Inicio

- Vuelva al Activity Center (Centro de actividad).


> Learn (Más información)

- Acceda a información adicional proporcionada por un cuidador en la parte inferior de CareProgram.

> Care Team (Equipo de cuidados)

- Vea la lista compartida de profesionales sanitarios, cuidadores y familiares.

Datos compartidos

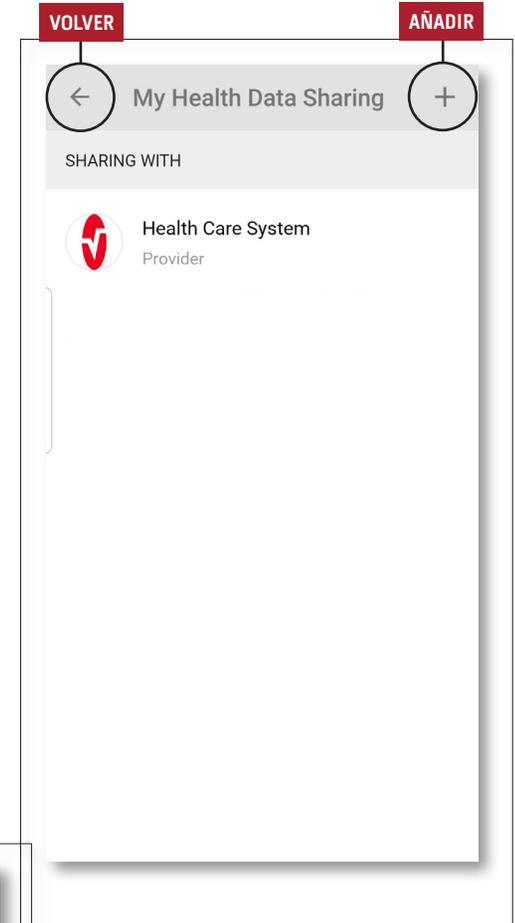

> Muestra la lista compartida de profesionales sanitarios, cuidadores y familiares.

> Añadir

- Comparta información con otros profesionales sanitarios.
- Comparta información con otros cuidadores o familiares.

> Deslice el dedo sobre una persona compartida para eliminar o editar los privilegios.

AÑADIR

