Beknopte gebruiksaanwijzing

Masimo SafetyNet[™]-app

WAARSCHUWING: Voer geen zelfdiagnose of zelfmedicatie uit op basis van de metingen. Raadpleeg altijd uw dokter.



> Download en installeer de Masimo SafetyNet-app via: **Google Play**



De App Store



> Start de app en volg de stapsgewijze instructies om een account aan te maken, neem deel aan een gedeeld CareProgram[™] en begin met het verzamelen en delen van gegevens.

Voor verdere assistentie of vragen kunt u terecht op de website: www.masimo.com/masimo-safetynet

©2021 Masimo Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



301372/LAB-10726B-0621 EN-LAB-10206C

www.masimo.com

Inloggen, aanmelden, locatie, meldingen





www.masimo.com

Plaats

asked.

permission to select the correct servers for your country and to allow

Please allow the permissions when

TOESTAAN

pairing of Bluetooth sensors.

> Sign Up (Aanmelden)

te versturen.

Gezondheidstoestemmingen (alleen iOS)

Activiteitencentrum



> Volg de instructies op het scherm: Om Masimo SafetyNet toegang te geven tot de gezondheidsgegevens van het apparaat en deze te verzamelen.

- > Menu (Menu)
- Bekijk het app-menu.

> Dashboard (Dashboard)

- Bekijk het scherm Dashboard (Dashboard) dat de gezondheidsgegevens van de gebruiker toont.
- Bekijk de gezondheidsgegevens die door andere gebruikers worden gedeeld.
- > Sharing (Delen)
- Toont de zorgverleners en familieleden met wie de gebruiker momenteel gegevens deelt.
- Deel gegevens met een andere zorgverlener, verzorger of familielid.
- > CareProgram
- Hier kan de gebruiker een CareProgram bekijken of verwijderen.

ENU	
Activity Center	
ាំរាំ DASHBOARD	SHARING
Health Care System	S
All Continuous Monitoring	0 0 0
Please complete action items d	ue today.
Last Viewed December 20 2020 04:31 p.m.	RESUME
remote-monitoring	
- ₹jikin	
All Continuous Monitoring	0 0 0
Please complete action items d	ue today.
Last Viewed	DEOUNTE

Menu

• Het menu kan ook worden bekeken door van links naar rechts over het scherm te vegen.

Jr



> Settings (Instellingen)

- Geeft de gebruikers-ID weer.
- Hier kan de gebruiker Touch ID of Face ID in- of uitschakelen om in te loggen op de app.
- Toont app-informatie.
- > Feedback (Feedback)
- Hier kan de gebruiker een e-mail sturen naar Masimo SafetyNet-ondersteuning.
- > Log Out (Uitloggen)
 - Hier kan de gebruiker uitloggen op de app.

- > Activity Center
- (Activiteitencentrum) Geeft het scherm Activity Center
- (Activiteitencentrum) weer.
- > Dashboard (Dashboard)
- Geeft het scherm Dashboard (Dashboard) weer.
- > Profile (Profiel)
- Geeft de informatie van het gebruikersprofiel weer.
- Hier kan de gebruiker de profielinformatie wijzigen.
- > My Device (Mijn apparaat)
- Hier kan de gebruiker een bewakingsapparaat toevoegen.
- > Live (Live)
- Hier kan de gebruiker de gegevens van het aangesloten bewakingsapparaat bekijken.
- > Change Password (Wachtwoord) wijzigen)/Change Security Questions (Beveiligingsvragen wijzigen)
- Hier kan de gebruiker het wachtwoord wijzigen en/of de beveiligingsvragen wijzigen wanneer het wachtwoord vergeten is.
- > Notification Settings (Meldingsinstellingen)
- Hier kan de gebruiker de instellingen voor meldingen en herinneringen van de app wijzigen.
- > Measurement Settings (Meetinstellingen)
- Hier kan de gebruiker de meeteenheden wijzigen.

> Invite (Uitnodigen)

- Hier kan de gebruiker anderen uitnodigen om informatie te delen via de app.
- > Share (Delen)
- Toont de zorgverleners en familieleden met wie de gebruiker momenteel gegevens deelt.
- > Edit (Bewerken)
 - Hier kan de gebruiker de gegevens op het dashboard anders rangschikken.
- > Bekijk de gegevens van de laatste 30 dagen of een weekoverzicht.
- > Selecteer een parameterkaart om trends. datumbereiken en aanvullende gegevens te bekijken.

IENU			DELEN	BEWER
	ashboard			
CR	НА	DH		
Me	Hui	Dan	Invite	
Trend fo	or last 30 days	5	Weekly Summ	hary
😯 Hea	rt Rate			
Average				
35 - 255 _{bpm}		1.1.		1-1F
Yesterday a	t 3:30 p.m.			
80 Ster	os			
Daily Aver	age	1.1		
1,100 :	steps	I		- 1
12/09 3:04	a.m.			
💇 Bloo	od Pressure			
Last Value	9		_	\sim
120/6	0 mmHg	• •		~`
12/20 8:07	a.m.			
👘 Heig	ght			
Last Value	9			
6' 6"				

Dashboard

CareProgram

Delen



> Care Card (Zorgkaart)

- De zorgkaartgegevens bekijken.
- > Home (Home)
- Ga terug naar het activiteitencentrum.

> Learn (Informatie)

 Onderaan het CareProgram vindt u aanvullende informatie die door een zorgverlener is verstrekt.

> Care Team (Zorgteam)

 Bekijk de lijst met gedeelde zorgverleners en familieleden.

- > Toont de lijst met gedeelde zorgverleners en familieleden.
- > Toevoegen
- Deel met extra zorgverleners.
- Deel met extra verzorgers of familieleden.
- > Veeg over een gedeelde persoon of verwijder of bewerk privileges.



TOEVOEGEN

Who do you want to share your health data with?

Healthcare Provider

Caregiver or family member

CANCEL