


간편 설명서

Masimo SafetyNet™ 앱

경고: 측정 결과를 토대로 자가 진단하거나 자가 투약하지 마십시오. 항상 의사와 상담하십시오.

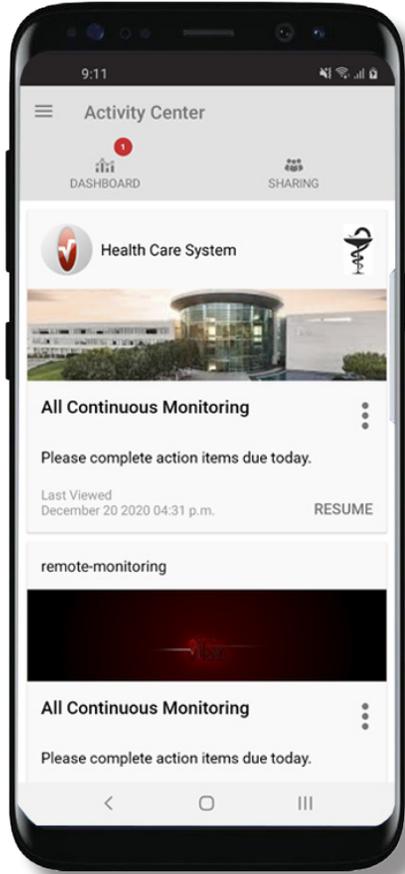

> 다음에서 Masimo SafetyNet 앱을 다운로드하여 설치합니다.

Google Play



App Store



> 앱을 실행한 다음 단계별 사용 지침에 따라 계정을 생성하고, 공유 CareProgram™에 참여하고, 데이터 수집 및 공유를 시작합니다.

추가로 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있는 경우 문의처:

www.masimo.com/masimo-safetynet

©2021 Masimo Corporation. 모든 권리 보유. 그 밖의 모든 상표 및 등록 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.




301374/LAB-10728B-0621
EN-LAB-10206C

www.masimo.com

로그인, 가입, 위치, 알림


> 가입

- 이메일 주소 또는 전화번호를 사용하여 계정에 가입합니다.
- 의료 서비스 제공자로부터 CareProgram을 제공받은 경우, 초대장을 보내는 데 사용된 이메일 또는 전화 번호로 로그인해야 합니다.

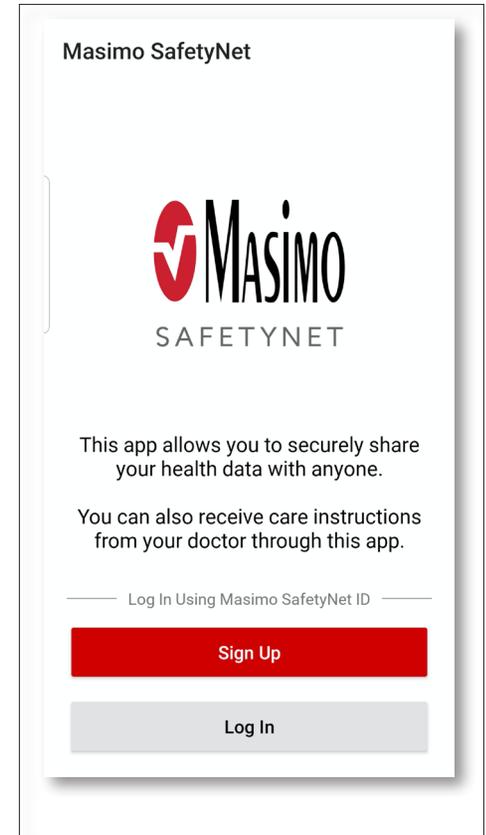


> 적절한 앱 기능을 위해 위치 및 알림이 허용되는지 확인하십시오.

위치

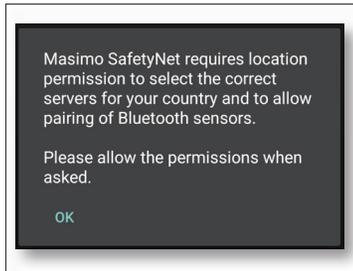


허용

알림

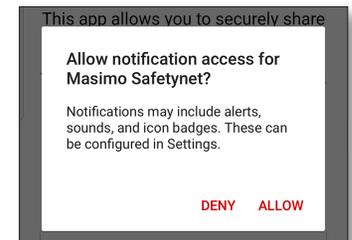


건강 데이터 권한(iOS 전용)

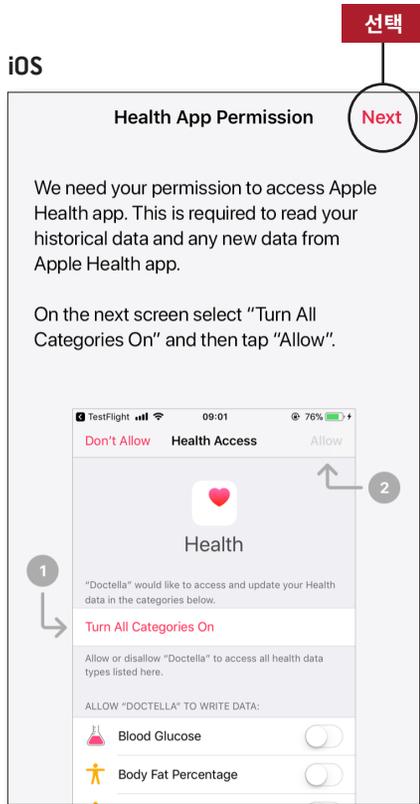


- > 화면의 사용 지침을 따릅니다. Masimo SafetyNet이 장치에서 건강 데이터에 액세스하고 수집할 수 있도록 허용합니다.

활동 센터

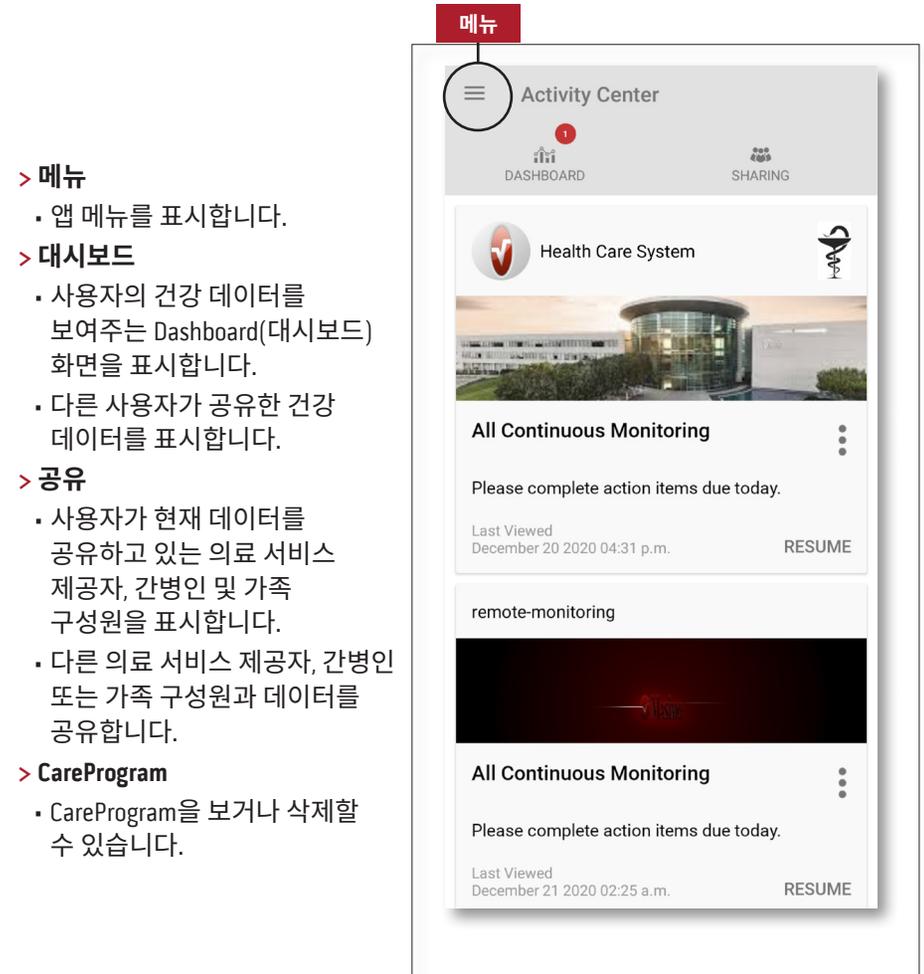

메뉴

- 메뉴는 화면을 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하여 볼 수도 있습니다.

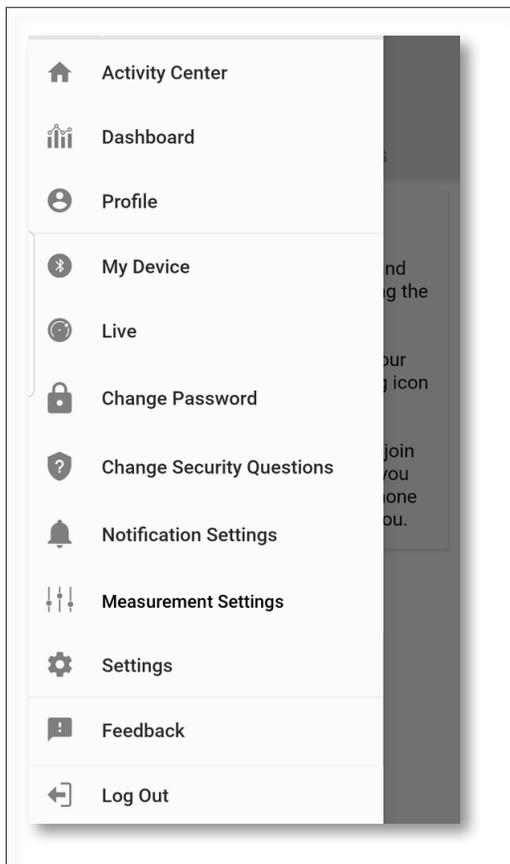

> 피드백

- Masimo SafetyNet 지원팀에 이메일을 보낼 수 있습니다.

> 로그아웃

- 사용자가 앱에서 로그아웃하는 것을 허용합니다.

> 활동 센터

- 활동 센터 화면이 표시됩니다.

> 대시보드

- 대시보드 화면이 표시됩니다.

> 프로필

- 사용자 프로필 정보가 표시됩니다.
- 프로필 정보를 수정할 수 있습니다.

> 내 장치

- 모니터링할 장치를 추가할 수 있습니다.

> 라이브

- 연결된 모니터링 장치의 데이터를 볼 수 있습니다.

> 암호 변경/보안 질문 변경

- 암호 분실 시 암호 및/또는 보안 질문을 변경할 수 있습니다.

> 알림 설정

- 앱 알림 및 리마인더 설정을 변경할 수 있습니다.

> 측정 설정

- 사용자가 측정 단위를 변경할 수 있습니다.

> 설정

- 사용자 ID를 표시합니다.
- 앱에 로그인할 때 터치 ID 또는 얼굴 ID를 활성화 또는 비활성화합니다.
- 앱 정보를 표시합니다.

대시보드

> 초대

- 앱을 통해 정보를 공유하도록 다른 사람을 초대할 수 있습니다.

> 공유


- 사용자가 현재 데이터를 공유하고 있는 의료 서비스 제공자, 간병인 및 가족 구성원을 표시합니다.

> 편집


- 대시보드의 데이터를 재배열할 수 있습니다.

> 지난 30일간 또는 주별 요약 데이터를 봅니다.

- 추이, 날짜 범위 및 추가 데이터를 보려는 매개 변수 카드를 선택합니다.

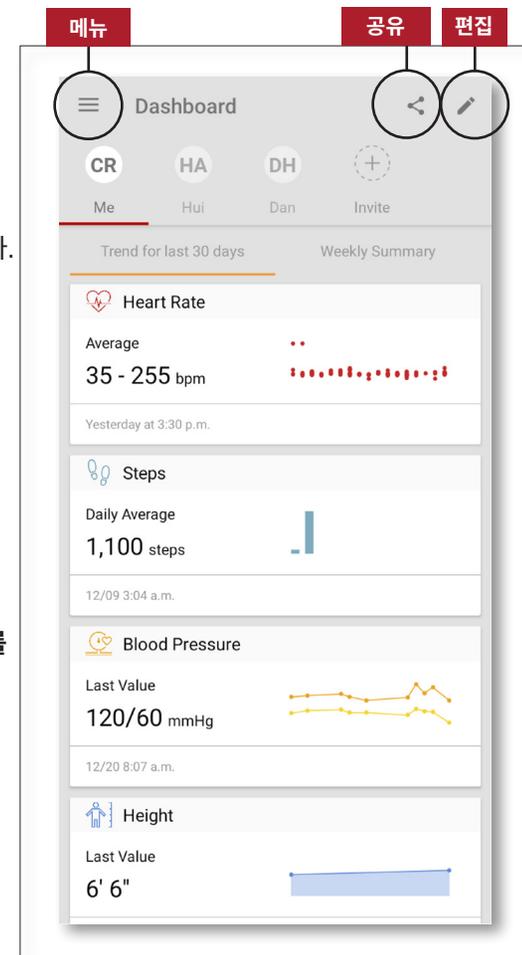


CareProgram

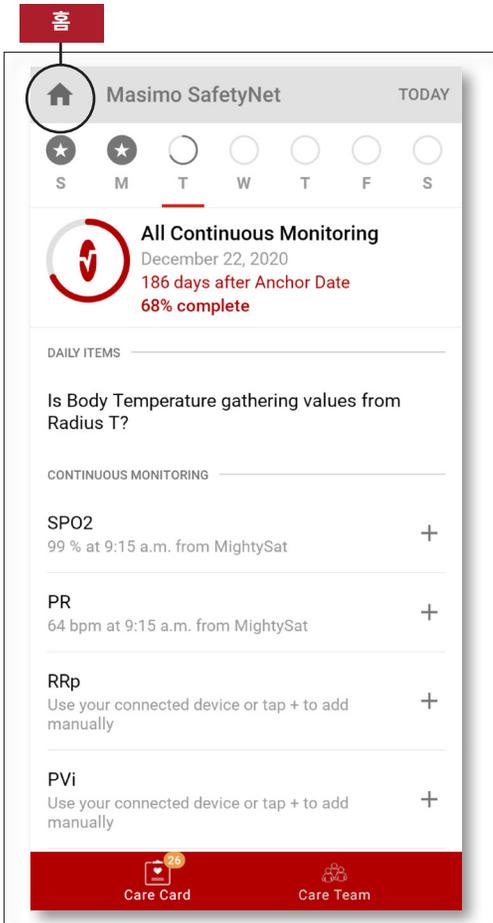

- > 관리 카드
 - 관리 카드 데이터를 봅니다.
- > 홈
 - 활동 센터로 돌아갑니다.
- > 학습
 - CareProgram 하단에 있으며 간병인이 제공한 추가 정보를 볼 수 있습니다.
- > 관리팀
 - 공유 의료 서비스 제공자, 간병인 및 가족 구성원의 목록을 표시합니다.

공유

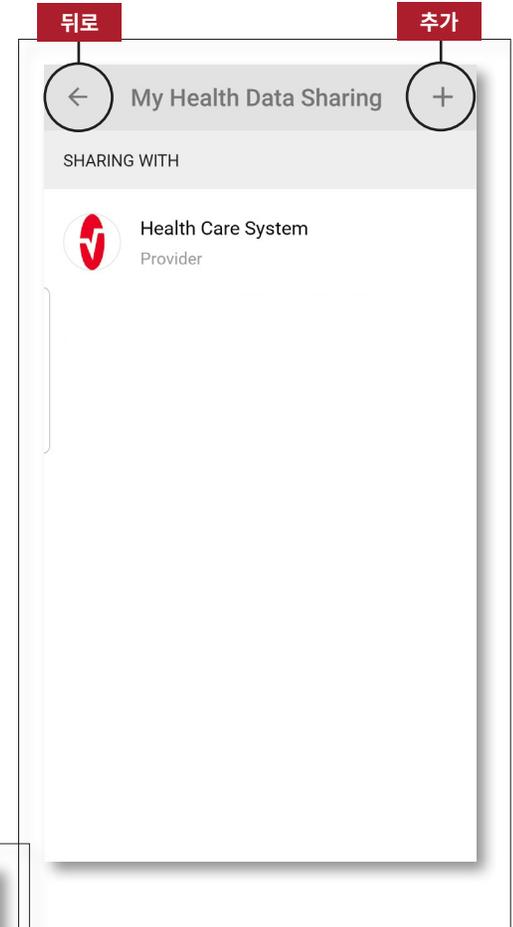

- > 공유 의료 서비스 제공자, 간병인 및 가족 구성원의 목록을 표시합니다.
- > 추가
 - 추가 의료 서비스 제공자와 공유합니다.
 - 추가 간병인 또는 가족 구성원과 공유합니다.
- > 공유된 개인을 살짝 밀어 권한을 제거하거나 편집합니다.

추가

