מדריך עזר מהיר

Masimo SafetyNet™ יישום

אזהרה: אין לבצע אבחון עצמי או לקבוע באופן עצמאי טיפול תרופתי על סמך המדידות. תמיד יש להיוועץ ברופא.



יש להוריד ולהתקין את היישום Masimo SafetyNet

Google Play



App Store



> הפעל את היישום ופעל לפי ההוראות שלב אחר שלב ליצירת חשבון, הצטרף לתוכנית ™CareProgram משותפת, והתחל לאסוף ולשתף נתונים.

לסיוע נוסף או במקרה שיש לך שאלות אנא בקר בכתובת: www.masimo.com/masimo-safetynet

2021 Masimo Corporation. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים האחרים והסימנים המסחריים הרשומים הנם רכוש של בעליהם בהתאמה.



301377/LAB-10731B-0621 EN-LAB-10206C

www.masimo.com

כניסה ליישום, הרשמה, התראות



(בלבד iOS) הרשאות גישה אל נתוני בריאות

פעל לפי הוראות על המסך: <

לקבל גישה Masimo SafetyNet

ולאסוף נתונים הקשורים לבריאות

-כדי לאפשר ל

מהמכשיר.

מרכז פעילות



תפריט <

• עיון בתפריט היישום.

(לוח הבקרה) Dashboard <

- עיון במסך Dashboard (לוח הבקרה) המציג את הנתונים הקשורים לבריאות של המשתמש.
- עיון בנתונים הקשורים לבריאות ששותפו על ידי משתמשים אחרים.
 - (שיתוף) Sharing <
- הצגת הספקים של שירותי
 בריאות, המטפלים ובני משפחה
 שעימם המשתמש משתף כעת
 את הנתונים שלו.
- שיתוף נתונים עם ספק שירותי
 בריאות, מטפל או בן משפחה אחר.
 - CareProgram <
 - מאפשר למשתמש לעיין ב-CareProgram או למחוק אותה.



תפריט

תפריט

לוח הבקרה



Activity Center îĥ Dashboard 0 Profile * My Device nd g the \bigcirc Live ur icon A **Change Password** join ? **Change Security Questions** /ou one ou. Notification Settings Measurement Settings Ċ Settings : Feedback €] Log Out

(משוב) Feedback <

• מאפשר למשתמש לשלוח דוא"ל למרכז התמיכה של Masimo SafetyNet.

(יציאה) Log Out <

 מאפשר למשתמש לצאת מהיישום.

- (מרכז פעילות) Activity Center <
- Activity Center מציג את המסך (מרכז פעילות).
 - (לוח הבקרה Dashboard <
 - מציג את המסך Dashboard (לוח הבקרה).
 - (פרופיל) Profile <
- מציג את מידע מפרופיל המשתמש.
 מאפשר למשתמש לעדכן את המידע בפרופיל.
 - בפרופיק. (מכשיר שלי) My Device <
 - מאפשר למשתמש להוסיף מכשיר לניטור.
 - (שידור חי) Live <
 - מאפשר למשתמש לצפות בנתונים ממכשיר הניטור המחובר.
- (שינוי סיסמה)/ Change Password < Change Security Questions (שינוי שאלות אבטחה)
- מאפשר למשתמש לשנות את הסיסמה ו/או את שאלות האבטחה במקרה של אבדן סיסמה.
 - Notification Settings < (הגדרות התראה)
 - מאפשר למשתמש לשנות את
 הגדרות ההתראה והתזכורת של
 היישום.
 - Measurement Settings < (הגדרות מדידה)
 - מאפשר למשתמש לשנות את יחידות המידה.
 - (הגדרות) Settings <
 - מציג את מזהה המשתמש.
 - מאפשר למשתמש להפעיל או להשבית את הכניסה ליישום באמצעות זיהוי טביעת אצבע או זיהוי פנים.
 - מציג את פרטי היישום.

אמפשר למשתמש להזמין אחרים מאפשר למשתמש להזמין אחרים לשתף מידע באמצעות היישום. לשתף מידע באמצעות היישום. הצגת הספקים של שירותי בריאות, המטפלים ובני משפחה שעימם המשתמש משתף כעת את

- (עריכה) Edit <
- מאפשר למשתמש לארגן מחדש את המידע ב-Dashboard (לוח הבקרה).
- עיון בנתונים מ-30 הימיםהאחרונים או עיון בסיכום שבועי.
 - > בחירת כרטיס פרמטרים כדי להציג מגמות, טווחי תאריכים ונתונים נוספים.

Das	hboard			
CR	HA	DH	(\pm)	
Me	Hui	Dan	Invite	
Trend for la	ast 30 day:	S	Weekly Summ	ary
😯 Heart I	Rate			
Average				
35 - 255	bpm	2.0.0		-11
Yesterday at 3:3	0 p.m.			
80 Steps				
Daily Average	9	1.1		
1,100 step	os	I		
12/09 3:04 a.m				
<u> </u> Blood	Pressure	9		
Last Value				\sim
120/60 r	mmHg	• •		
12/20 8:07 a.m				
👘] Height				
Last Value				
6' 6"				

CareProgram

ה-CareProgram, משמש לעיון

במידע נוסף שהתקבל מהמטפל.

• עיון ברשימת הספקים של שירותי

Masimo SafetyNet	TODAY
(כרטיס מעקב) Care Card <	T F S
 Care Card עיון בנתוני All Continuous M (כרטיס מעקב). ברית 	Monitoring
Activity Center - חזרה ל-Activity Center ל- הזרה ל-Activity Center ל- מרכז פעילות).	
(לימוד) Learn < Is Body Temperature gatherin Radius T? ה-CareProgram, משמש ל	ıg values from
במידע נוסף שהתקבל מהמכ צוות המטפלים (צוות המטפלים Care Team < SP02 א געון ברשומת הספקוס של וע 99 % at 9:15 a.m. from MightySat	. +
בריאות, המטפלים PR בריאות, המטפלים PR ובני המשפחה שעימם 64 bpm at 9:15 a.m. from Mighty:	Sat +
משותף המידע. RRp Use your connected device or tap manually	+ to add +
PVi Use your connected device or tap manually	+ to add +
Care Card	සීය Care Team

7

שיתוף

