


# Hızlı Başvuru Kılavuzu

## Masimo SafetyNet™ Uygulaması

**UYARI:** Ölçümleri temel alarak kendi kendinize tanı koymayın veya kendi kendinize ilaç almayın. Daima doktorunuza danışın.

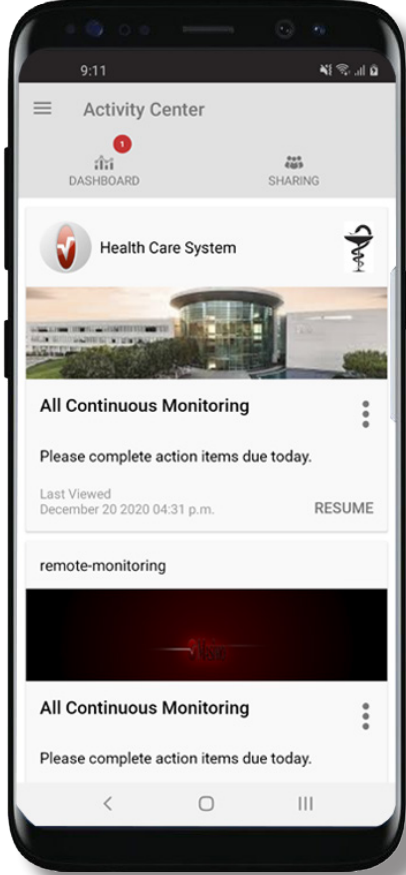

> Masimo SafetyNet Uygulamasını indirip yüklemek için:

Google Play



App Store



> Uygulamayı başlatın ve talimatlardaki adımları izleyerek bir hesap oluşturun, ortak bir CareProgram™ programına katılın ve veri toplayıp paylaşmaya başlayın.

Daha fazla yardım almak veya sorularınız için:  
[www.masimo.com/masimo-safetynet](http://www.masimo.com/masimo-safetynet)



©2021 Masimo Corporation. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

301434/LAB-10777B-0621  
EN-LAB-10206C

[www.masimo.com](http://www.masimo.com)

## Oturum Açma, Kaydolma, Konum, Bildirimler

### > Kaydolma

- E-posta adresinizle veya telefon numaranızla bir hesap açarak kaydolun.
- Sağlık kuruluşlarından tarafınıza bir CareProgram gönderildiyse davetinizi göndermek için kullanılan e-posta adresi veya telefon numarasıyla oturum açmanız gerekir.

> Uygulamanın düzgün çalışması için Konum bilginizi paylaştığınızdan ve Bildirimlere izin verdiğinizden emin olun.

### Konum

Masimo SafetyNet requires location permission to select the correct servers for your country and to allow pairing of Bluetooth sensors.

Please allow the permissions when asked.

OK

**İZİN VER**

### Masimo SafetyNet



This app allows you to securely share your health data with anyone.

You can also receive care instructions from your doctor through this app.

Log In Using Masimo SafetyNet ID

Sign Up

Log In

### Bildirimler

This app allows you to securely share

Allow notification access for Masimo Safetynet?


Notifications may include alerts, sounds, and icon badges. These can be configured in Settings.

DENY ALLOW

[www.masimo.com](http://www.masimo.com)


## Sağlık İzinleri (Sadece iOS)

iOS

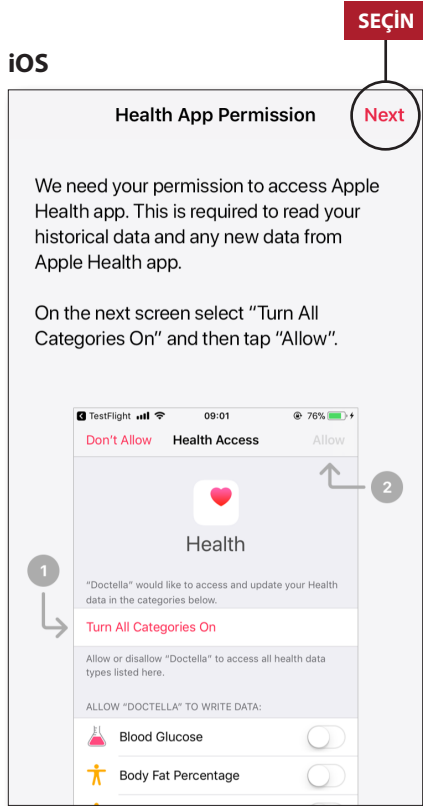

- > **Ekrandaki talimatları izleyerek:** Masimo SafetyNet uygulamasının cihazdaki sağlık verilerine erişmesine ve verileri almasına izin verin.


## Faaliyet Merkezi

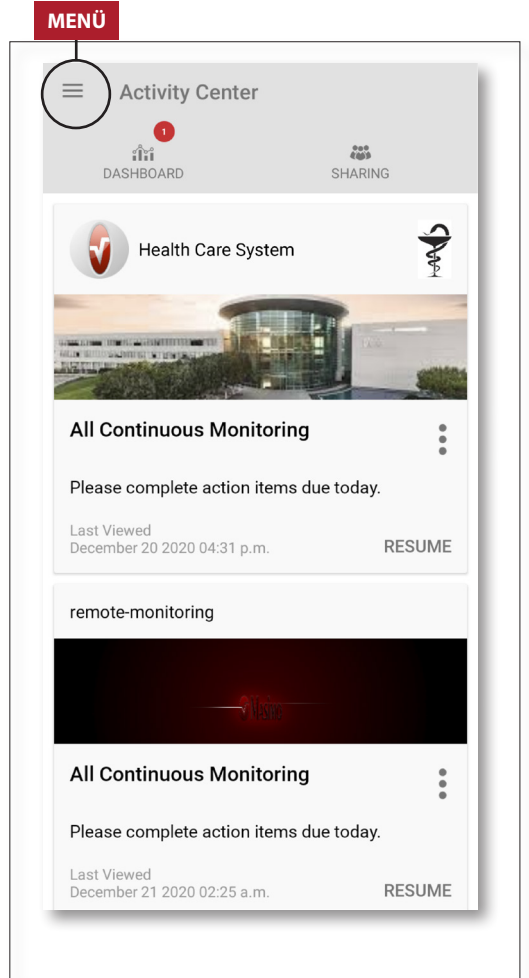

- > **Menü**
- Uygulama Menüsünü gösterir.
- > **Pano**
- Kullanıcının sağlık verilerinin yer aldığı Dashboard (Pano) ekranını gösterir.
  - Diğer kullanıcılarla paylaşılan sağlık verilerini görüntüler.
- > **Paylaşım**
- Kullanıcının veri paylaşımı yaptığı sağlık kuruluşları, hasta bakıcıları ve aile üyelerini gösterir.
  - Verileri, başka bir sağlık kuruluşu, hasta bakıcı veya aile üyesiyle paylaşır.
- > **CareProgram**
- Kullanıcının bir CareProgram görüntülemesine veya silmesine izin verir.

## Menü

- Menü ayrıca ekranda soldan sağa doğru kaydırma yaparak da görüntülenebilir.

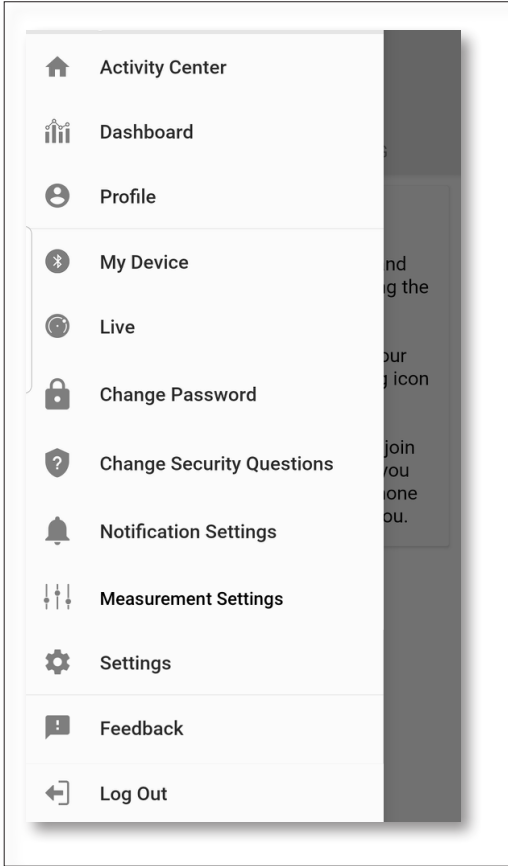

### > Feedback (Geri Bildirim)

- Kullanıcının Masimo SafetyNet destek birimine e-posta göndermesine izin verir.

### > Log Out (Oturumu Kapat)

- Kullanıcının uygulama oturumunu kapatmasına izin verir.

### > Activity Center (Faaliyet Merkezi)

- Activity Center (Faaliyet Merkezi) ekranını gösterir.

### > Dashboard (Pano)

- Dashboard (Pano) ekranını gösterir.

### > Profil (Profil)

- Kullanıcının profil bilgilerini gösterir.
- Kullanıcının profil bilgilerini değiştirmesine izin verir.

### > My Device (Cihazım)

- Kullanıcının izlemek üzere bir cihaz eklemesine izin verir.

### > Live (Canlı)

- Bağlı izleme cihazındaki verilerin kullanıcı tarafından görüntülenmesine izin verir.

### > Change Password (Parolayı Değiştir)/Change Security Questions (Güvenlik Sorularını Değiştir)

- Parolanın kaybedilmesi durumunda kullanıcının parolayı veya güvenlik sorularını değiştirmesine izin verir.

### > Notification Settings (Bildirim Ayarları)

- Kullanıcının, uygulamadaki bildirim ve hatırlatma ayarlarını değiştirmesine izin verir.


### > Measurement Settings (Ölçüm Ayarları)

- Kullanıcının ölçü birimlerini değiştirmesine izin verir.

### > Settings (Ayarlar)

- Kullanıcı kimliğini gösterir.
- Kullanıcının uygulamada oturum açmak için Touch ID veya Face ID özelliklerini etkinleştirip devre dışı bırakmasına izin verir.
- Uygulama bilgilerini gösterir.

## Pano

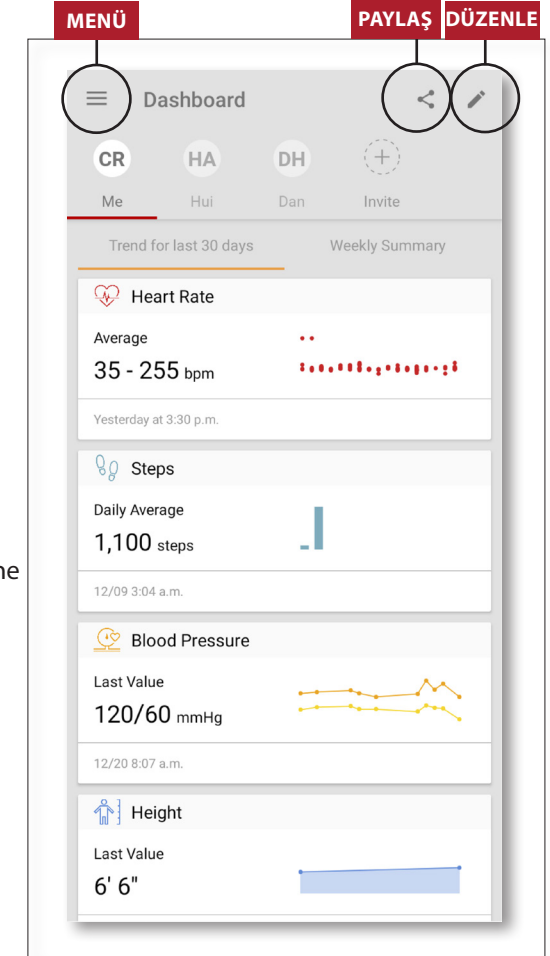

### > Invite (Davet Et)

- Kullanıcının uygulama üzerinden bilgi paylaşmak üzere başkalarını davet etmesine izin verir.

### > Share (Paylaş)

- Kullanıcının veri paylaşımı yaptığı sağlık kuruluşları, hasta bakıcıları ve aile üyelerini gösterir.

### > Edit (Düzenle)


- Kullanıcının Pano üzerindeki verileri yeniden düzenlemesine izin verir.

### > Son 30 günün verilerini ya da haftalık özeti görüntüleyebilirsiniz.

### > Parametre kartlarından birini seçerek eğilimleri, veri aralıklarını ve ek bilgileri görebilirsiniz.

## CareProgram

### ANA SAYFA

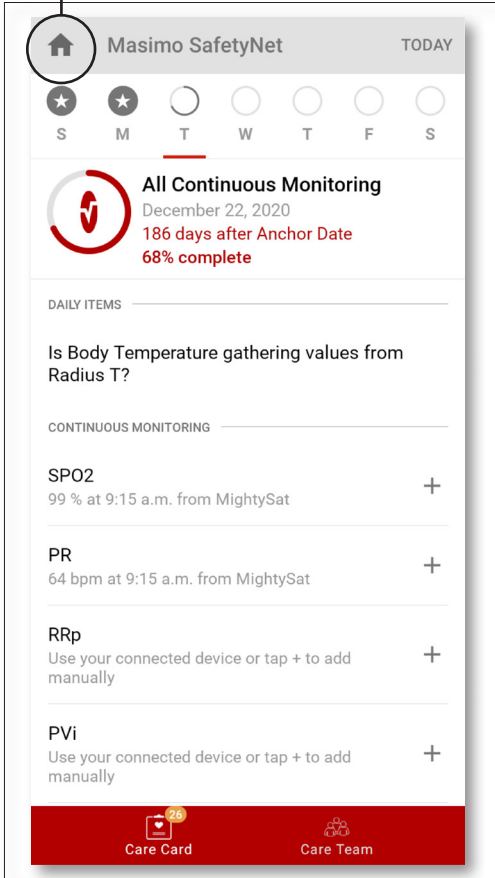

#### > Care Card (Bakım Kartı)

- Care Card (Bakım Kartı) verilerini gösterir.

#### > Home (Ana Sayfa)

- Activity Center (Faaliyet Merkezi) sayfasına geri döner.

#### > Learn (Öğren)

- CareProgram'ın alt bölümünde bulunur, hasta bakıcılar tarafından sunulan ilave bilgileri gösterir.


#### > Care Team (Bakım Ekibi)

- Paylaşım yapılan sağlık kuruluşları, hasta bakıcılar ve aile üyelerinin bir listesini gösterir.

## Paylaşım

### GERİ

### EKLE

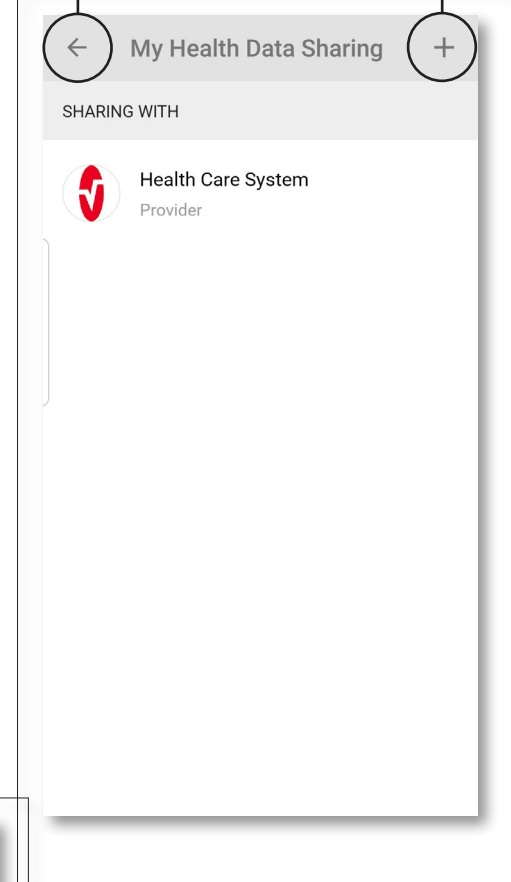

#### > Paylaşım yapılan sağlık kuruluşları, hasta bakıcılar ve aile üyelerinin bir listesini gösterir.

#### > Add (Ekle)

- Başka sağlık kuruluşlarıyla paylaşır.
- Başka hasta bakıcılar veya aile üyeleriyle paylaşır.

#### > Ayrıcalıkları kaldırmak veya düzenlemek için paylaşım yapılan kişiyi kaydırın.

### EKLE

Who do you want to share your health data with?

Healthcare Provider

Caregiver or family member

CANCEL