


Lynreferencevejledning

Appen Masimo SafetyNet™

ADVARSEL: Undlad at selvdiagnosticere eller selvmedicinere på basis af målingerne. Rådfør dig altid med din læge.

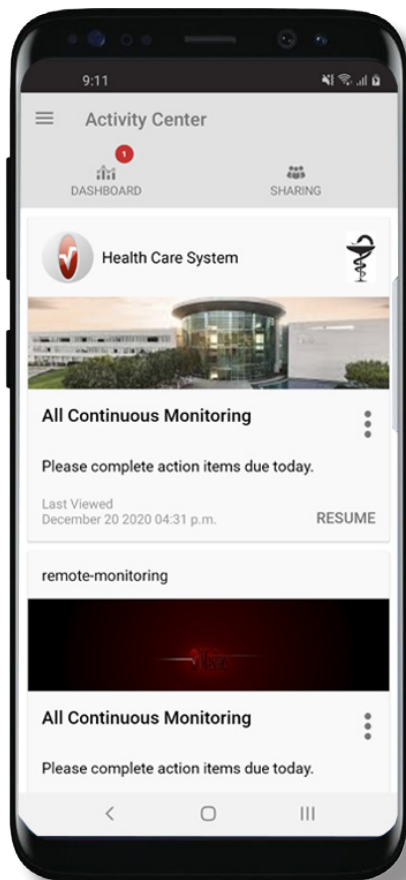

- > Download og installér appen Masimo SafetyNet App fra:

Google Play



App Store



- > Start appen, og følg trin-for-trin-anvisningerne for at oprette en konto, deltage i et delt CareProgram™ og begynde at indsamle og dele data.

For yderligere hjælp eller spørgsmål kan du besøge:

www.masimo.com/masimo-safetynet

©2021 Masimo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive ejere.



301435/LAB-10778B-0621
EN-LAB-10206C

www.masimo.com


Log på, Tilmeld, Sted, Meddelelser

> Tilmeld

- Tilmeld dig en konto vha. e-mailadresse eller telefonnummer.
- Hvis du har modtaget et CareProgram fra en sundhedsudbyder, skal du tilmelde dig med den e-mailadresse eller det telefonnummer, der blev brugt til at sende din invitation.


- > Sørg for, at sted og meddelelser er tilladt for korrekt funktion af appen.

Sted

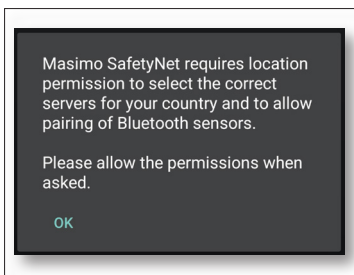

TILLAD


Meddelelser

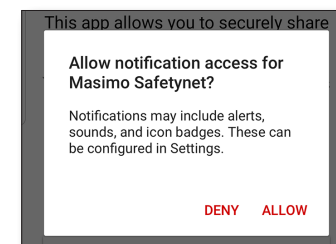

www.masimo.com

Sundhedstilladelser (kun iOS)


iOS

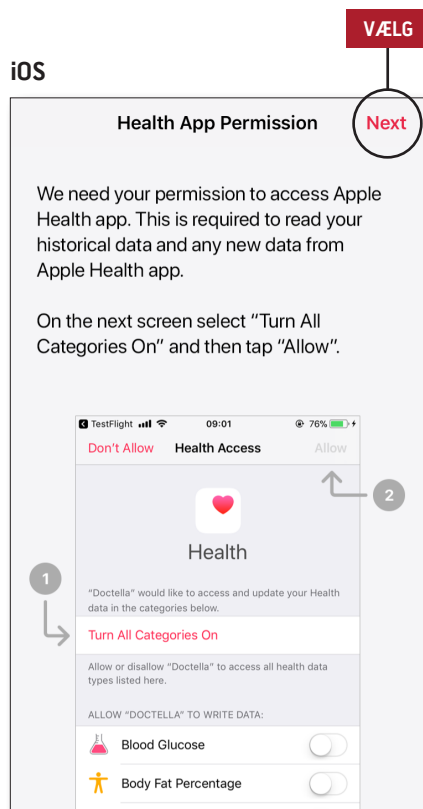

- > **Følg anvisningerne på skærmen:**
Sådan tillader du Masimo SafetyNet at få adgang til og indsamle helbredsdata fra enheden.


Aktivitetscenter

- > **Menu**
 - Få vist Menu i appen.
- > **Dashboard**
 - Få vist skærmen Dashboard, som viser brugerens helbredsdata.
 - Få vist helbredsdata, der deles af andre brugere.
- > **Sharing (Deling)**
 - Viser helbredsudbydere, plejgivere og familiemedlemmer som brugeren aktuelt deler data med.
 - Del data med en anden helbredsudbyder, en anden plejgiver eller et andet familiemedlem.
- > **CareProgram**
 - Gør det muligt for brugeren at få vist eller slette et CareProgram.

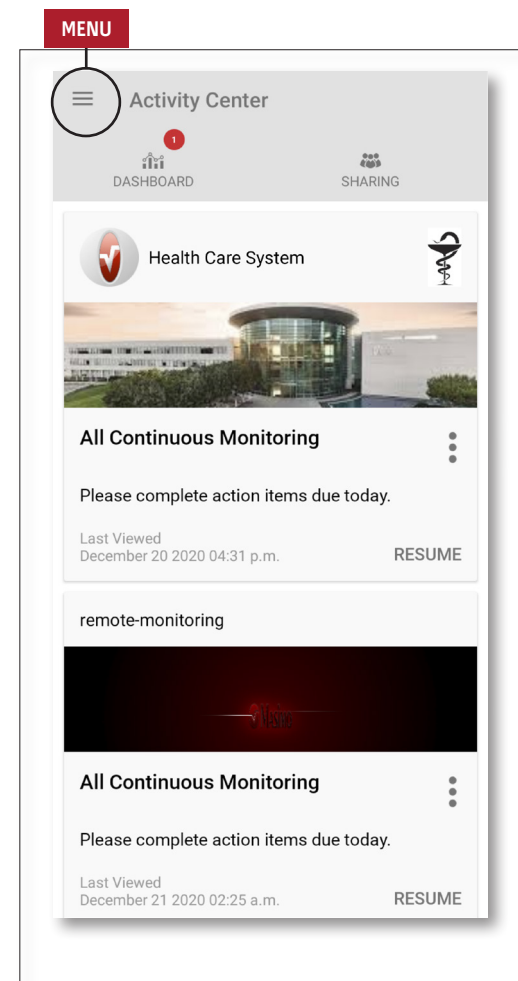

Menu

- Menuen kan også vises ved at stryge over skærmen fra venstre til højre.

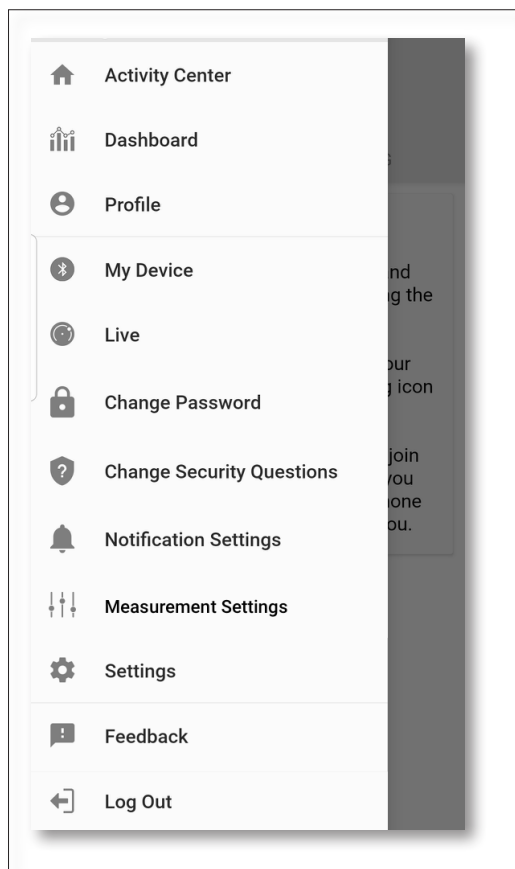

> Feedback

- Gør det muligt for brugeren at sende en e-mail til Masimo SafetyNet support.

> Log Out (Log ud)

- Gør det muligt for brugeren at logge af appen.

> Activity Center (Aktivitetscenter)

- Viser skærmen Activity Center (Aktivitetscenter).

> Dashboard

- Viser skærmen Dashboard.

> Profile (Profil)

- Viser oplysninger om brugerprofilen.
- Gør det muligt for brugere at redigere oplysningerne om brugerprofilen.

> My Device (Min enhed)

- Gør det muligt for brugeren at tilføje en enhed til monitorering.

> Live

- Gør det muligt for brugeren at få vist data fra den tilsluttede monitoreringsenhed.

> Change Password (Skift adgangskode)/ Change Security Questions (Skift sikkerhedsspørgsmål)

- Gør det muligt for brugeren at ændre adgangskode og/eller sikkerhedsspørgsmål, hvis adgangskoden mistes.

> Notification Settings (Meddelelsesindstillinger)

- Gør det muligt for brugeren af ændre indstillinger for app-meddelelser og påmindelser.

> Measurement Settings (Målingsindstillinger)

- Gør det muligt for brugeren at skifte måleenheder.

> Settings (Indstillinger)

- Viser bruger-id'et.
- Gør det muligt for brugeren at aktivere eller deaktivere berørings-id eller ansigts-id til at logge på appen.
- Viser appoplysninger.

Dashboard

> Invite (Inviter)

- Gør det muligt for brugere at invitere andre til at dele oplysninger gennem appen.

> Share (Del)


- Viser helbredsudbydere, plejgivere og familiemedlemmer som brugeren aktuelt deler data med.

> Edit (Rediger)


- Gør det muligt for brugeren at omarrangere data på Dashboard.

> Få vist data for de sidste 30 dage eller i en ugentlig oversigt.

> Vælg et parameterkort for at få vist trends, datointervaller og yderligere data.

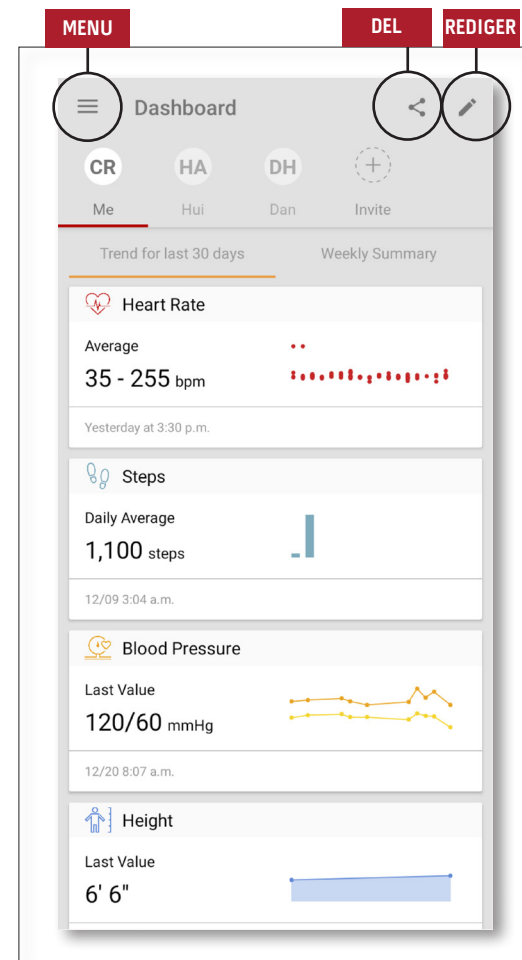


CareProgram

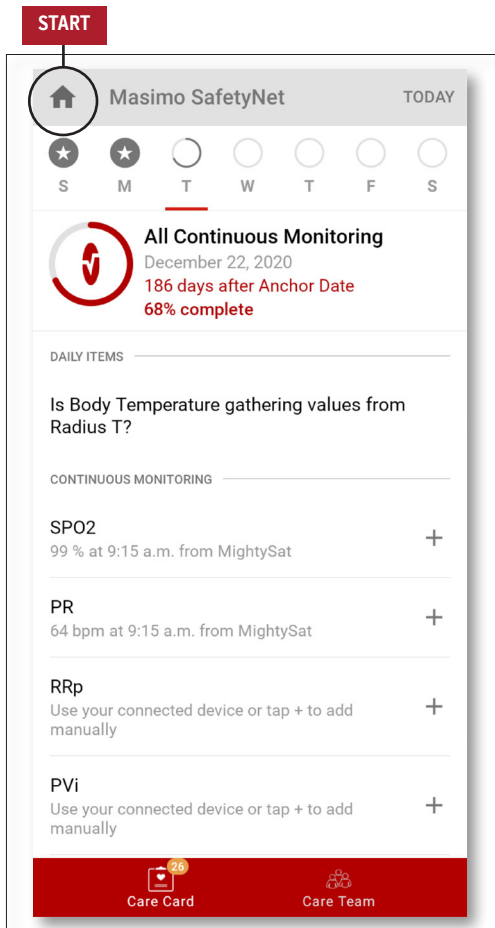

- > **Care Card (Plejekort)**
 - Få vist data på Care Card (Plejekort).
- > **Home (Start)**
 - Gå tilbage til Activity Center (Aktivitetscenter).
- > **Learn (Lær)**
 - Nederst i CareProgram kan du se yderligere oplysninger fra en plejeger.
- > **Care Team (Plejeteam)**
 - Få vist listen over delte sundhedsudbydere, plejere og familiemedlemmer.

Deling

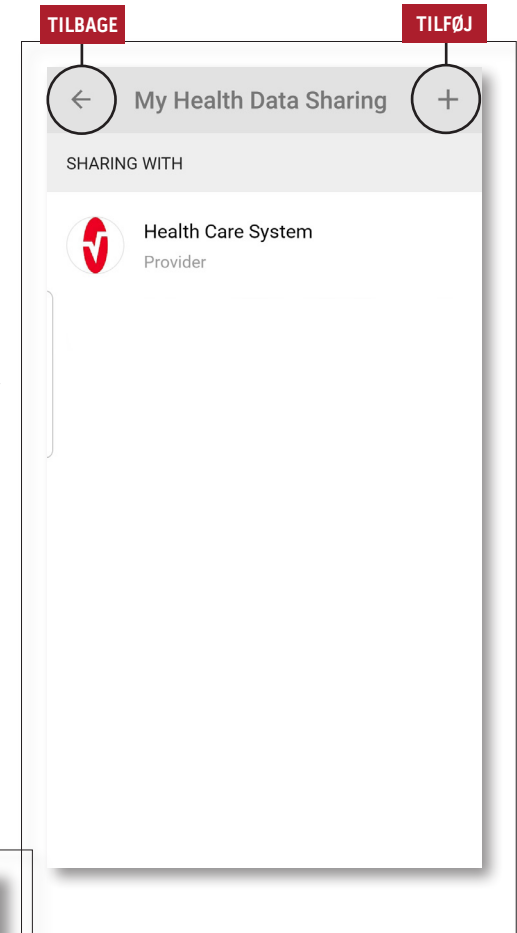

- > **Viser listen over delte sundhedsudbydere, plejere og familiemedlemmer.**
- > **Add (Tilføj)**
 - Del med yderligere helbredsudbydere.
 - Del med yderligere plejere eller familiemedlemmer.
- > **Stryg over en delt person for at fjerne eller redigere rettigheder.**

TILFØJ

